

# AIR-FLOW MASTER PIEZON®

→ PROPHYLAXE KOMPLETT

**NEU**  
VOM ERFINDER  
DER ORIGINAL  
METHODEN



**EMS**  
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

# ALLES PROPHYLAXE → ALLES ORIGINAL

## METHODE PIEZON®

### 1 ORIGINAL PIEZON® HANDSTÜCK MIT LED

- > Optimale Sicht durch zirkuläre Lichtemission
- > Leicht und ergonomisch
- > Sterilisierbar bis 135° C

### 2 PIEZON® NO PAIN-TECHNOLOGIE

- > Optimale Instrumentenbewegungen
- > Intelligente Feedback-Kontrolle
- > Präzise Behandlungsergebnisse
- > Grosser Patientenkomfort

### 3 EMS SWISS INSTRUMENTS<sup>PM</sup>


- > Jeweils mit CombiTorque® zum sicheren Handling
- > Breites Anwendungsgebiet

### 4 FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER

- > 350ml oder 500ml Volumen
- > Einfaches Befüllen

### 5 DRY WORK CONTROL LED

- > Leuchtet bei Anwendung ohne Flüssigkeit

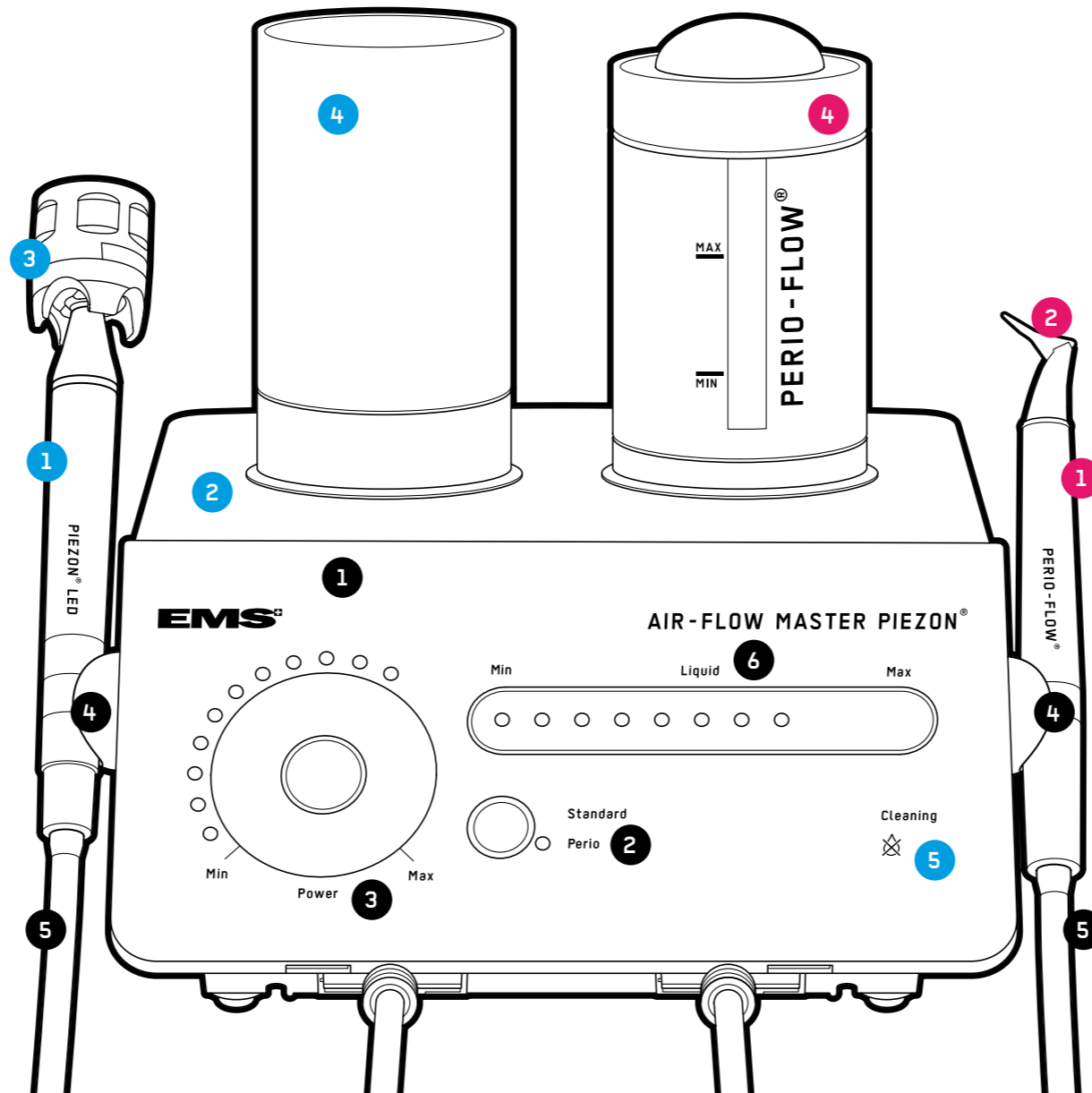

### 1 TOUCH PANEL

- > Schnelle und genaue Einstellungen
- > Einfach zu reinigen, hygienisch

### 2 ARBEITSMODI „STANDARD“ UND „PERIO“

- > Methode Piezon® und Methode AIR-FLOW® – jeweils einfaches Wechseln zwischen den Behandlungsmodi (manuell)
- > Methode AIR-FLOW® Perio – automatischer Switch auf Perio bei Verwendung der Pulverkammer Perio

### 3 POWER

- > LED-Einstellungen in 17 Stufen
- > Einfaches Einstellen entsprechend der klinischen Anforderung

### REINIGUNGSMODUS „PURGE“

- > Taste seitlich am Gerät
- > Individuelle Reinigung aller Leitungen und Schläuche (AIR-FLOW® und/oder Piezon®)

### 4 HANDSTÜCKHALTER

- > Magnetisch, abnehmbar

### 5 SCHLAUCH

- > Jeweils abnehmbar an Einheit und Handstück

### 6 „LIQUID“

- > Einfaches Regulieren der Durchflussmenge

## METHODE AIR-FLOW®

### ZWEI HANDSTÜCKE

- > Sub- und supragingivale Anwendung
- > Free-Flow-Technologie
- > Sterilisierbar bis 135° C

### 1 PERIO-FLOW® HANDSTÜCK


- > Subgingivale Anwendung, bis zum Boden tiefer Parodontaltaschen

### 2 PERIO-FLOW® DÜSE

- > Einmal-Düse, einfach aufzusetzen
- > 3 Düsenaustritte für Pulver-Luft-Gemisch, horizontal
- > 1 Düsenaustritt für Wasser, vertikal

### 3 AIR-FLOW® HANDSTÜCK

- > Supragingivale Anwendung, auch in subgingivalem Grenzbereich
- > 120°-Winkel als Standard, optional mit 90°-Winkel

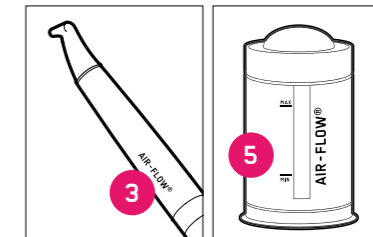

### ZWEI PULVERKAMMERN

- > Grosse Volumina für viele Anwendungen
- > Sichtbare Füllmenge dank Transparenz und Beleuchtung
- > Gleichmässiger Pulverfluss, kein Klumpen
- > Einfaches Abnehmen, Reinigen und Wiederbefüllen

### 4 KAMMER FÜR AIR-FLOW® PULVER PERIO


- > 45g Fassungsvermögen AIR-FLOW® Pulver PERIO

### 5 KAMMER FÜR AIR-FLOW® PULVER CLASSIC UND AIR-FLOW® PULVER SOFT

- > 100g Fassungsvermögen für AIR-FLOW® Pulver CLASSIC
- > 65g Fassungsvermögen für AIR-FLOW® Pulver SOFT

### FUSSSCHALTER

- > 4 Funktionen für beide Methoden
- > Inklusive Power Boost

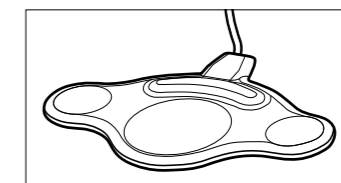

**PROPHYLAXE  
KOMPLETT**

# ORIGINAL METHODEN AIR-FLOW® UND PIEZON® HAND-IN-HAND → EINZIGARTIGES PROPHYLAXETEAM FÜR PROPHYLAXEPROFIS



## ORIGINAL METHODE AIR-FLOW®

- > Effektives Air-Polishing, zuverlässig, schnell und effizient für die Praxis – stressfrei und komfortabel für den Patienten (keine Küretten – keine Geräusche!)
- > Sanftes Applizieren biokinetischer Energie – keine Verletzung des Epitheliums und des Bindegewebes, keine Kratzer am Zahn



## ORIGINAL METHODE AIR-FLOW® PERIO

- > Wirkungsvolles Entfernen des Biofilms bis in die tiefsten Parodontaltaschen, nachhaltiges Reduzieren von Bakterien – gegen Zahnausfall (Parodontitis!) oder Verlust des Implantats (Periimplantitis!)
- > Gleichmässiges Verwirbeln des Pulver-Luft-Gemischs sowie des Spülwassers durch patentierte PERIO-FLOW® Düse – vermeidet Emphyseme

**AIR-FLOW®  
KILLS  
BIOFILM**  
ems-swissquality.com

## ORIGINAL METHODE PIEZON®

- > Einzigartig glatte Zahnoberflächen – lineare, parallel zum Zahn verlaufende Schwingungen der Original EMS Swiss Instruments<sup>PM</sup>
- > Intelligente Piezon® No Pain-Technologie – maximale Schonung des Zahnfleischs bei praktisch schmerzfreier Behandlung, grösster Patientenkomfort



**PIEZON®  
NO  
PAIN**  
ems-swissquality.com

Alles Wissenswerte über Prophylaxe mit den Original Methoden AIR-FLOW®, AIR-FLOW® Perio und Piezon® finden Sie in den Broschüren AIR-FLOW® KILLS BIOFILM und PIEZON® NO PAIN – Wissenschaft, neuester Stand – spannend und informativ

# EMS-SWISSQUALITY.COM

Persönlich willkommen via [welcome@ems-ch.com](mailto:welcome@ems-ch.com)